

Pink Hip Kit™ - H y forro para botas DermaProx™ - H

Instrucciones de uso

Sistema de inmovilización de cadera sin tornillos

Descripción del dispositivo

El Pink Hip Kit - H está diseñado para usarse con la mesa Hana® y evita el movimiento del paciente en la mesa quirúrgica durante los procedimientos artroscópicos de cadera.

El Pink Hip Kit - H es de un solo uso y se debe desechar una vez finalizado el procedimiento quirúrgico.

El Pink Hip Kit - H (Figura 1) consta de los siguientes componentes:

- A. Reposacabezas (1)
- B. Almohadilla Pink Hip Pad (1)
- C. Correa para el cuerpo (1)
- D. Sábana para elevación (1)
- E. Correas del soporte para brazos (1 par)
- F. Almohadillas del soporte para brazos (1 par)
- G. Cubierta de rótula (2)

El Pink Hip Kit - H y los forros para botas DermaProx - H constan de: los componentes anteriores del Pink Hip Kit - H así como los siguientes:

- H. Forro para botas DermaProx™ (1 par)

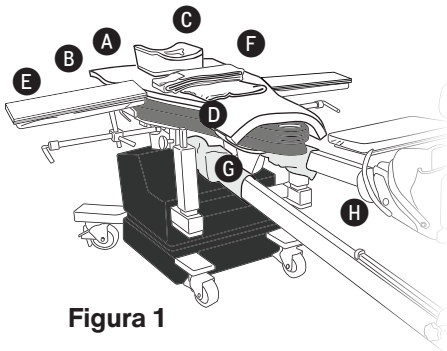


Figura 1

Uso previsto

El Pink Hip Kit - H debe utilizarlo profesional médico según estas instrucciones de uso. El entorno de uso debe ser un centro sanitario profesional.

Uso previsto

El Pink Hip Kit - H está diseñado para su uso con la mesa Hana® y evita el movimiento del paciente en la mesa durante los procedimientos artroscópicos de cadera.

Los forros para botas DermaProx - H están diseñados para su uso con la mesa Hana para ayudar a amortiguar y proteger el pie cuando se aplica tracción y minimizar el deslizamiento del pie y el talón durante los procedimientos de artroscopia de cadera.

Instrucciones de uso

El Pink Hip Kit y el forro para botas DermaProx - H están indicados para inmovilizar a los pacientes durante los procedimientos artroscópicos de cadera.

Grupos de pacientes objetivo

Los pacientes objetivo son los que el cirujano determine que necesitan someterse a un procedimiento artroscópico de cadera.

Contraindicaciones

- Ninguna

Advertencias

- El proveedor de atención médica debe familiarizarse con las instrucciones de uso del producto así como formar al personal de atención médica adecuado.
- Se prohíbe el uso del producto si no se siguen las indicaciones o el uso previsto. Las modificaciones del producto pueden cambiar los resultados esperados.

Precauciones

- Inspeccione el embalaje del producto antes de abrirlo. Si el embalaje está dañado o perforado, **NO UTILICE EL PRODUCTO**.
- Inspeccione el producto y el contenido cuando los saque del embalaje. Si el producto está dañado o defectuoso, **NO LO UTILICE** y póngase en contacto inmediatamente con el fabricante para obtener ayuda.
- Tenga cuidado al inmovilizar a los pacientes quirúrgicos. No arrastre a los pacientes por la superficie de la almohadilla Pink Hip Pad, ya que podría dañar el producto y perder su función.

Instrucciones


1. Coloque la almohadilla Pink Hip Pad en la sección perineal de la mesa para que haga contacto directo con la superficie de la mesa (*Figura 2*). Coloque las correas blancas de velcro en la parte inferior de la almohadilla Pink Hip Pad de manera que la etiqueta "This Side Up" (Este lado hacia arriba) quede mirando hacia arriba.

Figura 2



2. Sujete las correas blancas de velcro a las barandillas de la camilla quirúrgica pasándolas por debajo de la barandilla y pegando los extremos de velcro. (*Figura 3*)
3. Coloque la correa debajo de la camilla quirúrgica colocando primero el extremo más largo de las correas moradas debajo de la camilla y, a continuación, superponga el extremo más largo de la correa con el extremo más corto de la misma. Presione firmemente el material de gancho blanco del extremo más corto de la correa sobre el extremo más largo de la misma para fijarlo en su sitio. (*Figura 4*)

Figura 3

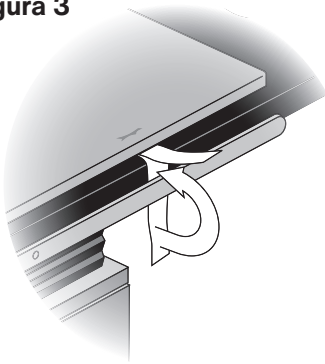

4. Coloque la sábana de elevación sobre la almohadilla, centrándola entre las correas de velcro tal y como se muestra. La sábana de elevación debe cubrir solo la parte de la almohadilla donde reposará la parte baja de la espalda del paciente: por debajo de la región de la escápula y por encima del sacro (*Figura 1*).
5. Coloque el reposacabezas sobre la almohadilla Pink Hip Pad™ donde haya espacio suficiente para colocar la cabeza del paciente.

Figura 4


Vista desde debajo de la mesa



Correas de almohadilla púrpuras fijadas a la mesa

6. Transfiera al paciente a la almohadilla Pink Hip Pad. Coloque al paciente de la siguiente forma:
 - La espina ilíaca anterosuperior (EIAS) del paciente debe colocarse directamente sobre las correas inferiores. (*Figura 5*)
 - Asegúrese de que los hombros no sobresalgan del borde superior de la almohadilla Pink Hip Pad para maximizar el contacto con la piel.
 - La piel de la región escapular y del sacro debe estar en contacto con la superficie de la almohadilla Pink Hip Pad.
 - Si es necesario, utilice la sábana de elevación para LEVANTAR con cuidado al paciente de la almohadilla Pink Hip Pad y cambiarlo de posición. No arrastre al paciente sobre la almohadilla. Asegúrese de que la almohadilla Pink Hip Pad permanezca plana en todo momento.


Figura 5

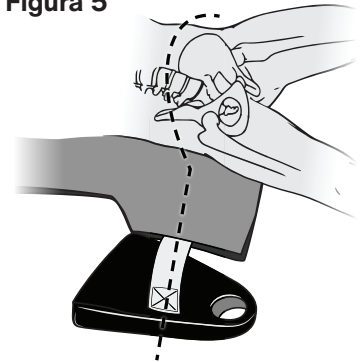

Alinee la EIAS con la correa inferior de la almohadilla Pink Hip Pad

7. Si es necesario, coloque los pies del paciente en los forros para botas DermaProx™ como se indica a continuación:
 - a. Establezca la orientación adecuada del forro para botas. El borde cosido debe alinearse con la planta del pie del paciente. (*Figura 6*)
 - b. Abra las correas y deslice el protector abierto sobre el pie del paciente con la orientación adecuada. (*Figura 7*)
 - c. Cierre las correas del forro de la bota sobre el pie del paciente y sujete bien el material de gancho blanco. Debe quedar bien ajustado sin impedir la circulación. (*Figura 7*)
 - d. Repita los pasos del "a" al "c" con el otro pie.

Figura 6

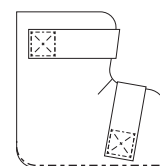

El borde cosido debe quedar alineado con el pie.

8. Coloque las almohadillas del soporte para brazos en los soportes para brazos de la mesa quirúrgica.
9. Coloque los brazos del paciente sobre las almohadillas del soporte para brazos con las palmas hacia arriba y asegúrelos con las correas del soporte para brazos. (Figura 9)

Figura 7


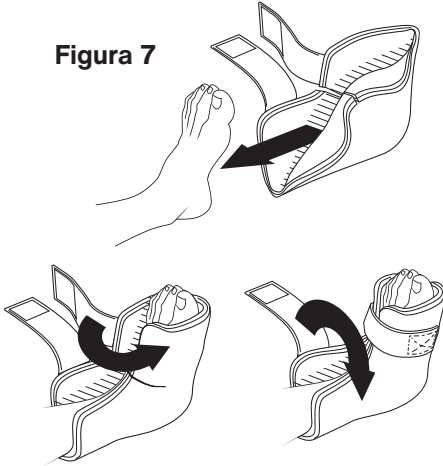


Figura 8

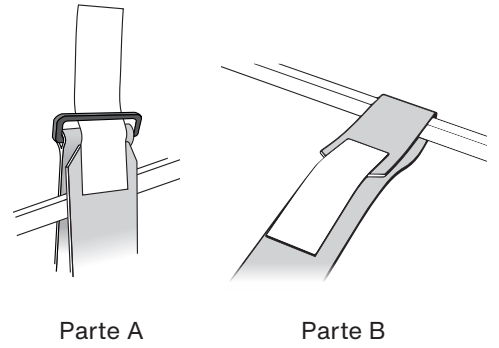


Parte A

Parte B

10. Coloque las correas del cuerpo (Figura 8) como se indica a continuación:
 - a. Comience por la *parte A* y oriente la correa de modo que el material blanco del gancho mire hacia fuera. Pase la correa a través de la hebilla hasta que se ajuste al riel accesorio y colóquela sobre el paciente.
 - b. Continúe por la *parte B* y pase el extremo de la correa entre la mesa y el riel de accesorios, asegurándose de que el material blanco largo del gancho quede hacia adentro. Presione el material blanco de gancho para fijarlo en su sitio.

Figura 9

Montaje completo con el paciente correctamente posicionado.

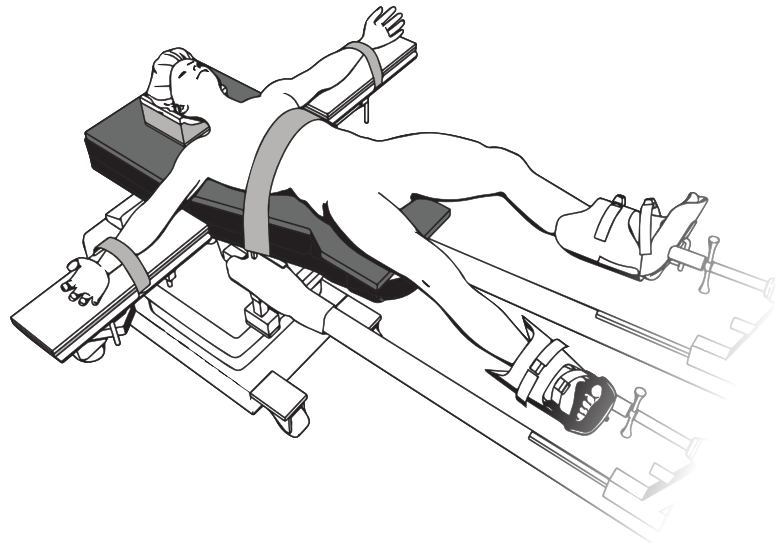

Glosario de símbolos

	Dispositivo médico
	Precaución
	Fabricante
	Fecha de fabricación
	Código de lote

	No utilizar si el paquete está dañado
	No reutilizar
	Sin látex
	Cantidad
	Numero de catalogo

	Consultar instrucciones electrónicas para uso
	Sin esterilizar
	Representante autorizado en la Comunidad Europea
	Conformidad Europea



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITFUPP037 R2 8/31/2022