

Wkładka ortezowa - H

Bezślupkowy system pozycjonowania w artroskopii stawu biodrowego

Opis urządzenia

Zestaw Pink Hip Kit H jest przeznaczony do stosowania ze stołem Hana® i zapobiega przemieszczaniu się pacjenta na stole operacyjnym podczas zabiegów artroskopowych stawu biodrowego.


Zestaw Pink Hip Kit H służy do jednorazowego użytku i należy go wyrzucić po zakończeniu zabiegu chirurgicznego.

Zestaw Pink Hip Kit H (Rysunek 1) składa się z następujących elementów:

- A. Pozycjoner głowy (1)
- B. Podkładka Pink Hip Pad (1)
- C. Pas do tułowia (1)
- D. Prześcieradło podnoszące (1)
- E. Paski płyty na ramię (1 para)
- F. Podkładki płyty na ramię (1 para)
- G. Osłona przegubu kulowego (2)

Zestaw Pink Hip Kit - H i wkładki ortezowe DermaProx - H składa się z: Zestawu Pink Hip Kit - elementy H powyżej, a także:

- H. Wkładek ortezowych DermaProx™ (1 para)

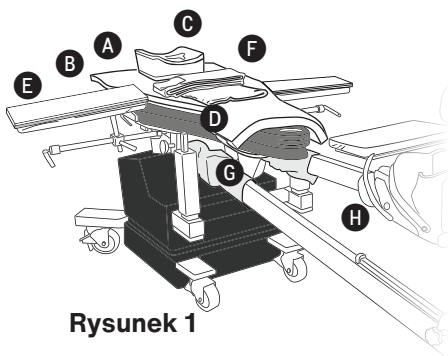

Rysunek 1

Docelowi użytkownicy

Zestaw Pink Hip Kit - H jest przeznaczony do użytku przez personel medyczny zgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania. Środowisko użytkowania to profesjonalna placówka służby zdrowia.

Przeznaczenie

Zestaw Pink Hip Kit - H jest przeznaczony do użytku ze Stołem Hana® i zapobiega ruchom pacjenta na stole podczas zabiegów artroskopowych stawu biodrowego.

Wkładki ortezowe DermaProx - H są przeznaczone do użytku ze stołem Hana, aby pomóc amortyzować i chronić stopę podczas stosowania trakcji oraz zminimalizować poślizg stopy i pięty podczas zabiegów artroskopii biodra.

Wskazania do stosowania

Zestaw Pink Hip Kit i wkładka ortezowa DermaProx - H są wskazane do stosowania do pozycjonowania pacjentów podczas zabiegów artroskopowych stawu biodrowego.

Docelowe grupy pacjentów

Populacja pacjentów składa się z pacjentów, u których zabieg artroskopii stawu biodrowego został określony jako konieczny przez operującego chirurga.

Przeciwwskazania

- Brak

Ostrzeżenia

- Obowiązkiem dostawcy opieki zdrowotnej jest zapoznanie się z instrukcją obsługi produktu, a także przeszkolenie odpowiedniego personelu medycznego.
- Używanie produktu niezgodnie ze wskazaniami lub przeznaczeniem jest zabronione. Modyfikacje produktu mogą zmienić oczekiwane wyniki.

Środki ostrożności

- Sprawdzić opakowanie produktu przed otwarciem. **NIE UŻYWAĆ**, jeśli opakowanie produktu jest uszkodzone lub przedziurawione.
- Sprawdzić produkt i zawartość po wyjęciu z opakowania. Jeśli produkt jest uszkodzony lub wadliwy, **NIE UŻYWAĆ** i natychmiast skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy.
- Zachować ostrożność podczas pozycjonowania pacjentów chirurgicznych. Nie przeciągać pacjentów po powierzchni podkładki Pink Hip Pad, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu i utratę jego funkcji.

Instrukcje


1. Umieścić podkładkę Pink Hip Pad w kroczonej części stołu tak, aby miała bezpośredni kontakt z powierzchnią stołu (*Rysunek 2*). Umieścić białe paski mocujące z rzepem na spodzie podkładki Pink Hip Pad tak, aby oznaczenie „Tą stroną do góry” było skierowane do góry.

Rysunek 2



2. Przymocować białe paski mocujące z rzepem do barierki łóżka chirurgicznego, przeprowadzając je pod szyną i łącząc ze sobą ich końce. (*Rysunek 3*)
3. Przymocować fioletowy pasek pod stołem chirurgicznym, umieszczając najpierw dłuższy koniec fioletowego paska pod stołem, a następnie nakładając dłuższy koniec paska na krótszy koniec paska. Upewnić się, że biała strona z haczykami krótszego końca paska jest mocno dociśnięta do dłuższego końca paska, aby zabezpieczyć go na miejscu. (*Rysunek 4*)

Rysunek 3

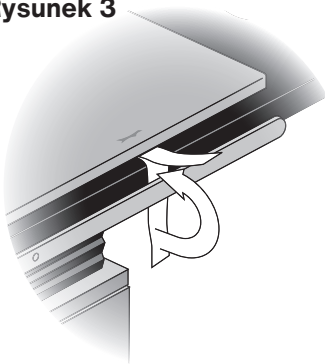

4. Położyć prześcieradło podnoszące na podkładce pomiędzy paskami mocującymi z rzepami, jak przestawiono na ilustracji. Prześcieradło podnoszące powinno zakrywać tylko tę część podkładki, która będzie obejmować plecy pacjenta – między łopatkami a kością krzyżową (*Rysunek 1*).
5. Umieścić pozycjoner głowy nad podkładką Pink Hip Pad™ w miejscu wystarczającym do umieszczenia głowy pacjenta.

Rysunek 4


Widok od spodu stołu



Fioletowe paski podkładki przymocowane do stołu

6. Przenieść pacjenta na podkładkę Pink Hip Pad. Ułożyć pacjenta w następujący sposób:
 - Kolec biodrowy przedni górny (KBPG) pacjenta powinien znajdować się bezpośrednio na wypustkach wyrównujących. (*Rysunek 5*)
 - Upewnić się, że barki nie wystają poza górną krawędź podkładki Pink Hip Pad, aby skóra przylegała jak najbardziej.
 - Skóra okolicy łopatki i kości krzyżowej musi przylegać do powierzchni podkładki Pink Hip Pad.
 - W razie potrzeby należy użyć prześcieradła podnoszącego, aby ostrożnie PODNIEŚĆ pacjenta z podkładki Pink Hip Pad w celu zmiany pozycji ciała. Nie przesuwaj pacjenta po podkładce. Upewnić się, że podkładka Pink Hip Pad znajduje się przez cały czas w pozycji płaskiej.


Rysunek 5

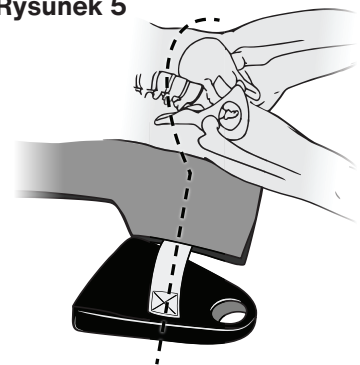

Dopasować KBPG do dolnego paska podkładki Pink Hip Pad.

7. Jeśli dotyczy, umieścić stopy pacjenta we wkładkach ortezowych DermaProx™ w następujący sposób:
 - a. Ustalić właściwą pozycję wkładki ortezowej. Przy właściwym ustawieniu zszyta krawędź zrówna się z podeszwą stopy pacjenta. (*Rysunek 6*)
 - b. Odczepić paski z rzepem i wsunąć otwartą wkładkę ortezową na stopę pacjenta, ustawiając ją we właściwy sposób. (*Rysunek 7*)
 - c. Zamknąć paski wkładki ortezowej na stopie pacjenta i upewnić się, że biały materiał z haczykami jest dobrze zamocowany. Dopasowanie powinno przylegać do ciała i nie utrudniać krążenia. (*Rysunek 7*)
 - d. Powtórzyć kroki od a do c dla drugiej stopy.


Rysunek 6

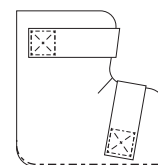


Zszyta krawędź zrównana z podeszwą stopy pacjenta.

8. Umieścić podkładki płyty na ramię na płytach na ramię stołu operacyjnego.
9. Położyć ręce pacjenta na podkładkach płyty na ramię dłońmi do góry i zabezpieczyć za pomocą pasków płyty na ramię (Rysunek 9).

Rysunek 7

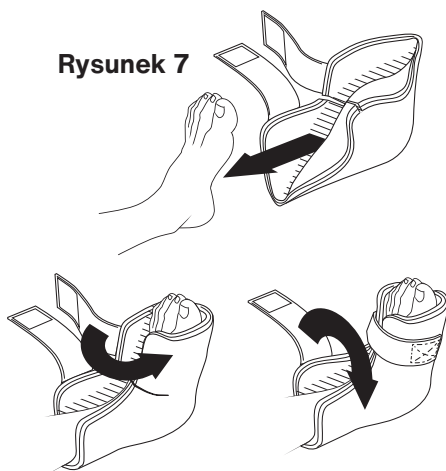

Rysunek 8

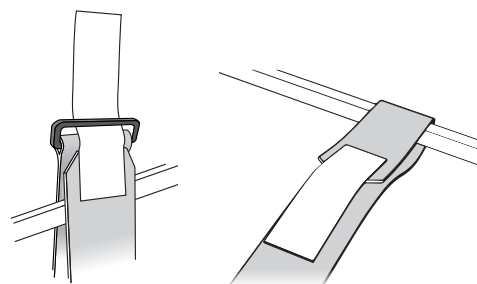


Część A

Część B

10. Przymocować pasek do ciała (Rysunek 8) w następujący sposób:
 - a. Rozpoczynając od części A, ustawić pasek tak, aby biały rzep był skierowany na zewnątrz. Przeciągać pasek przez sprzączkę, aż dopasuje się do szyny i przełożyć nad pacjentem.
 - b. Kontynuując w części B, przeciągnąć koniec paska do góry między stołem a szyną, upewniając się, że długi biały rzep jest skierowany do wewnątrz. Docisnąć białe rzepy do siebie, mocując je na swoim miejscu.

Rysunek 9

Zakończona konfiguracja z prawidłowo ułożonym pacjentem.

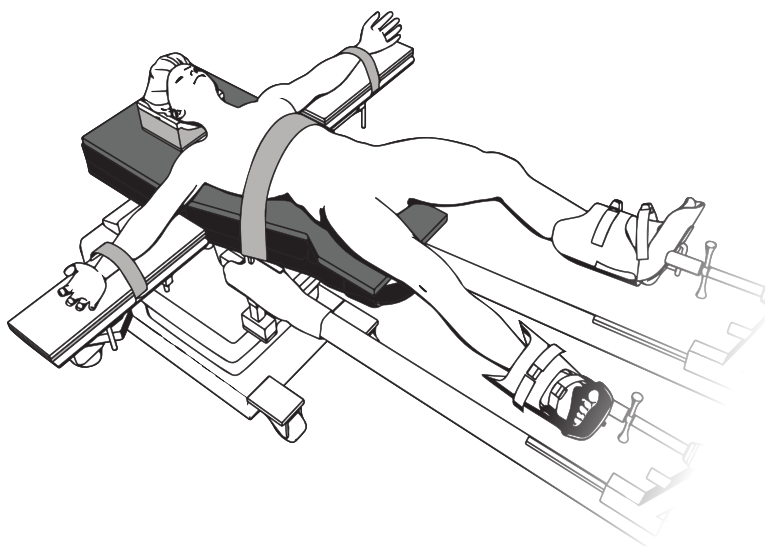

Słownik symboli

	Urządzenie medyczne
	Przeostroga
	Producent
	Data produkcji
	Kod partii

	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone
	Nie używać ponownie
	Bez lateksu
	Ilość
	Numer katalogu

	Zapoznać się z elektroniczną instrukcją użytkowania
	Niesterylny
	Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej
	Zgodność europejska

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP041 R2 8/31/2022