

MODE D'EMPLOI : Kit de positionnement pour Table Wilson™

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES.

DESCRIPTION

Le kit de positionnement sur table Wilson de Xodus Medical est un système de composants à base de mousse à utiliser sur la table Wilson pour les interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale.

INDICATIONS

Le kit de positionnement sur table Wilson est un dispositif non stérile à usage unique destiné à être utilisé lors d'interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale.

USAGE ET UTILISATEUR PRÉVUS

Cet appareil est destiné à être utilisé par des professionnels de santé qualifiés sur une table Wilson pour éviter les lésions cutanées des patients lors d'interventions chirurgicales.

CONTRADICTIONS

Cet appareil n'est pas conçu, vendu ni destiné à être utilisé autrement que comme indiqué.

CONNAISSANCE ET UTILISATION


Un usage professionnel nécessite la connaissance de cette notice d'utilisation. Utilisation de l'appareil limitée à la salle d'opération chirurgicale d'un hôpital ou d'un centre chirurgical.

AVANTAGES CLINIQUES

Le kit de positionnement sur table Wilson offre une protection cutanée au patient pendant l'intervention chirurgicale sur la colonne vertébrale avec kit de positionnement sur table Wilson.

PRÉPARATION ET UTILISATION

1. Soulevez les coussins du torse.
2. Placez la housse sous les coussins du torse. Assurez-vous que la housse est plate et bien répartie des deux côtés de la table. Utilisez les languettes adhésives pour fixer la housse au cadre.
3. Faites glisser les manchons des coussins de torse sur chaque coussin, pour couvrir l'ensemble du coussin. Remettez ensuite les coussins du torse dans leur position normale. Orientez la couche DermaProx™ vers le haut pour un contact direct avec la peau.
4. Faites glisser le couvercle de la barre transversale sur la barre transversale. Observez la fente dans le couvercle pour la placer au-dessus de la barre.
5. Placez chaque support de bras sur le panneau de bras correspondant (gauche et droit) en vous assurant que les découpes sont vers l'extérieur pour soutenir le bras.
6. Centrez l'appui-tête sur le panneau du support de tête et assurez-vous que l'ouverture ovale des yeux de l'appui-tête est correctement orientée vers le haut de la table avec la couche DermaProx vers le haut.

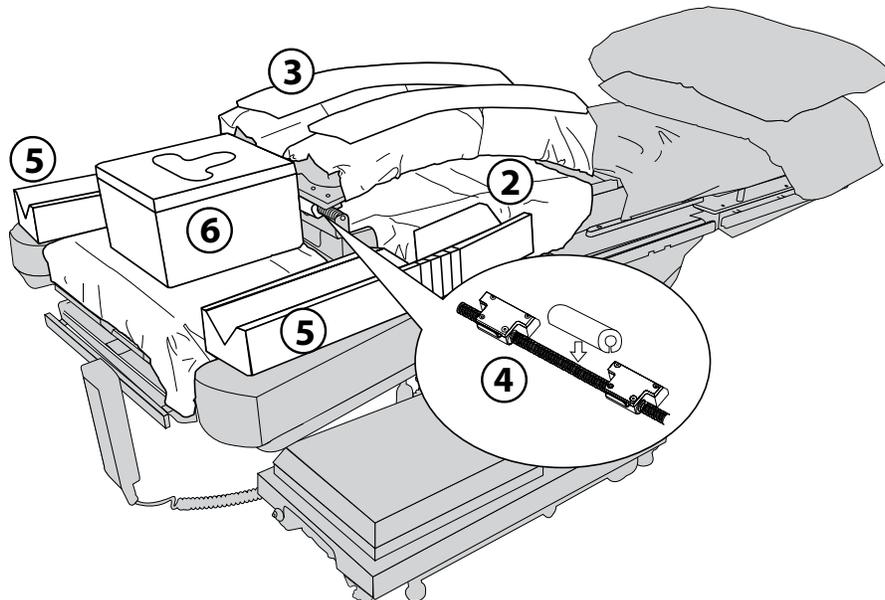

ÉLIMINATION

Après utilisation, le kit de positionnement sur table Wilson doit être éliminé conformément à la politique de l'hôpital.

MISES EN GARDE

- Cet appareil a été conçu, testé et fabriqué pour un usage unique sur un seul patient. La réutilisation ou le retraitement de cet appareil peut entraîner sa défaillance ou des blessures ultérieures.
- Le reconditionnement et/ou la stérilisation de ce dispositif peut créer un risque de contamination et d'infection du patient.
- Ne pas réutiliser, reconditionner ni stériliser ce dispositif.
- Après utilisation, le kit de positionnement sur table Wilson doit être éliminé conformément à la politique de l'hôpital.
- Le kit de positionnement sur table Wilson doit être stocké dans un endroit propre et sec à température ambiante avant utilisation. Éviter toute exposition prolongée à des températures élevées.
- Veuillez rechercher visuellement les marques de dommages sur l'emballage avant utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé, ouvert ou brisé.
- La loi fédérale des États-Unis restreint la vente de cet appareil par ou sur ordonnance d'un médecin.

PRÉCAUTIONS

- Le kit de positionnement sur table Wilson doit être utilisé conformément aux instructions d'utilisation et aux contre-indications, avertissements ou précautions fournis par le fabricant de l'instrument associé.
- Avis à l'utilisateur et/ou au patient que tout incident grave survenu en relation avec le dispositif doit être signalé à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi, ainsi qu'à Xodus Medical et son représentant agréé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Les matériaux de fabrication comprennent :
 - » Mousse de polyuréthane
 - » Polypropylène
- Durée de conservation – Indéfinie

CONDITIONS DE STOCKAGE, DE TRANSPORT ET DE FONCTIONNEMENT

- Le kit de positionnement sur table Wilson doit être stocké dans un endroit propre et sec à température ambiante avant utilisation. Éviter toute exposition prolongée à des températures élevées.



Attention, consulter
les documents
d'accompagnement



Dispositif
médical



xodusmedical.com/eifu
Consulter la notice
d'utilisation papier
ou électronique



Ne pas
réutiliser



Ne contient pas de latex
de caoutchouc naturel



Ne pas utiliser si
l'emballage est
endommagé
ou ouvert



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Pays-Bas



702 Prominence Drive Tél. +1 724.337.5500
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

ENREGISTRÉ FDA
CERTIFIÉ ISO 13485

xodusmedical.com | info@xodusmedical.com

LITIFUWF004 R0 3/13/2024