


PinkProtect Kit di posizionamento per Terapia Intensiva - Istruzioni per l'uso:

1. Rimuovere i singoli posizionatori dalla confezione. Per garantire la completa espansione dei posizionatori, attendere almeno cinque minuti prima di posizionare i pazienti.
2. I singoli posizionatori PinkProtect sono progettati per proteggere le prominenze ossee, le aree del paziente soggette a ulcere da pressione causate dalla degenza ospedaliera, ecc. Possono essere regolati, allineati e posizionati in base all'anatomia del paziente, al protocollo ospedaliero, ecc.

Quanto segue serve come linea guida generale:

- A. Posizionare il poggiatesta SideProne sul letto di terapia intensiva rispetto alla posizione prevista per la testa del paziente. Allineare il canale del tubo ET con le vie aeree del paziente, consentendo al tubo di intubazione di essere instradato, senza piegature, lontano dalla testa del paziente una volta posizionata su un lato.
- B. Posizionare i Pink Arcs in base al tipo di posizionamento: sotto i talloni, parte superiore dei piedi, ginocchia, collo, torace e torso a seconda dei requisiti procedurali, dell'anatomia del paziente, ecc.
- C. Allineare i Dual Layer Pads per una protezione generale della pelle e una distribuzione della pressione sotto ginocchia, cosce, gomiti, torace, ecc.

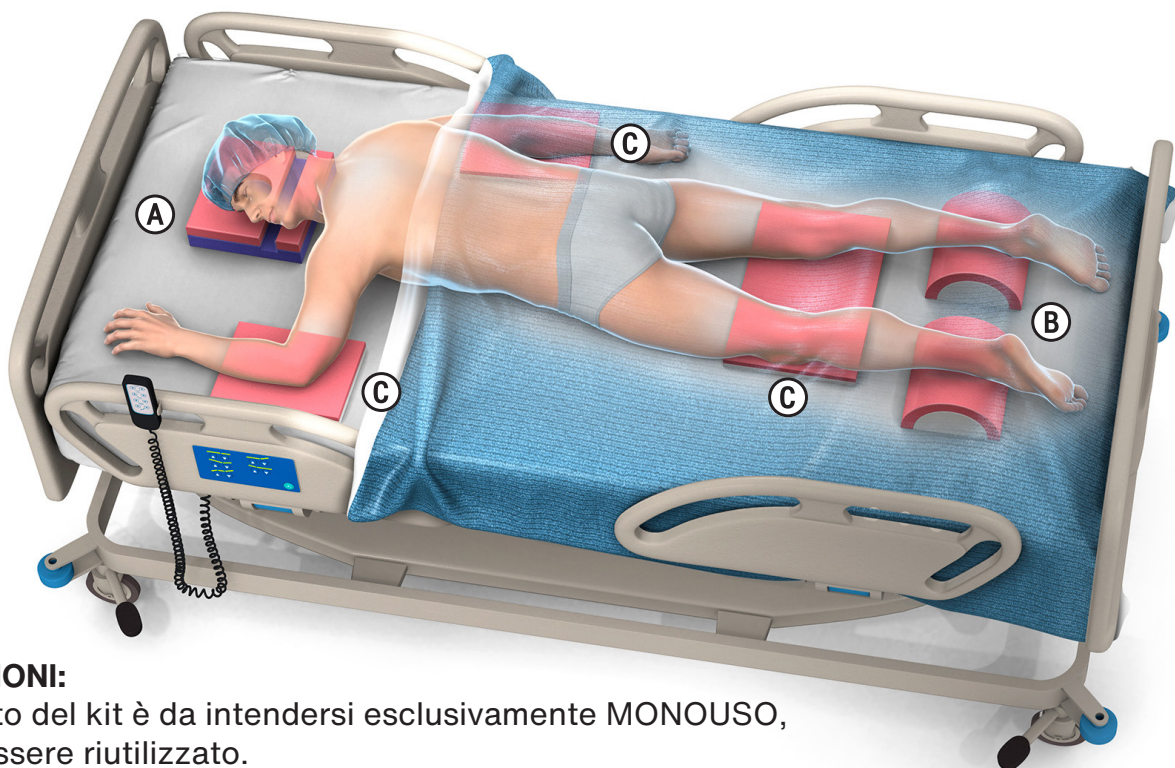

PRECAUZIONI:

Il contenuto del kit è da intendersi esclusivamente MONOUSO, non può essere riutilizzato.

AVVERTENZE:

Monitorare frequentemente il collo, la testa, gli occhi, il naso e la bocca del paziente per assicurarsi che venga mantenuta una posizione sicura e che il tubo ET non si pieghi o si sposti. Il mancato monitoraggio può portare a gravi conseguenze negative tra cui cecità e/o mancata ventilazione. Monitorare frequentemente le aree sensibili della pelle e, se necessario, risistemare il paziente per evitare il rischio di lesioni da pressione.

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



MADE IN THE
USA



702 Prominence Drive
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Distributore autorizzato: Novamedisan Italia s.r.l. Via dei Lapidari 3 40129 Bologna
Tel. +39 051.32.79.11 - 32.68.88 Fax +39 051.32.79.05 - 32.63.25
info@novamedisan.it - www.novamedisan.it

LITIFUIC002 R0 1/25/2021

U.S. Patents: 8,464,720; 8,511,314; 9,161,876; 9,750,656; 9,782,287; 9,931,262; 9,949,883; 10,045,902; 10,285,890; 10,324,050 European Patent: EP 2 802 305 B1