


BRUGSVEJLEDNING: DEN PINK PAD®

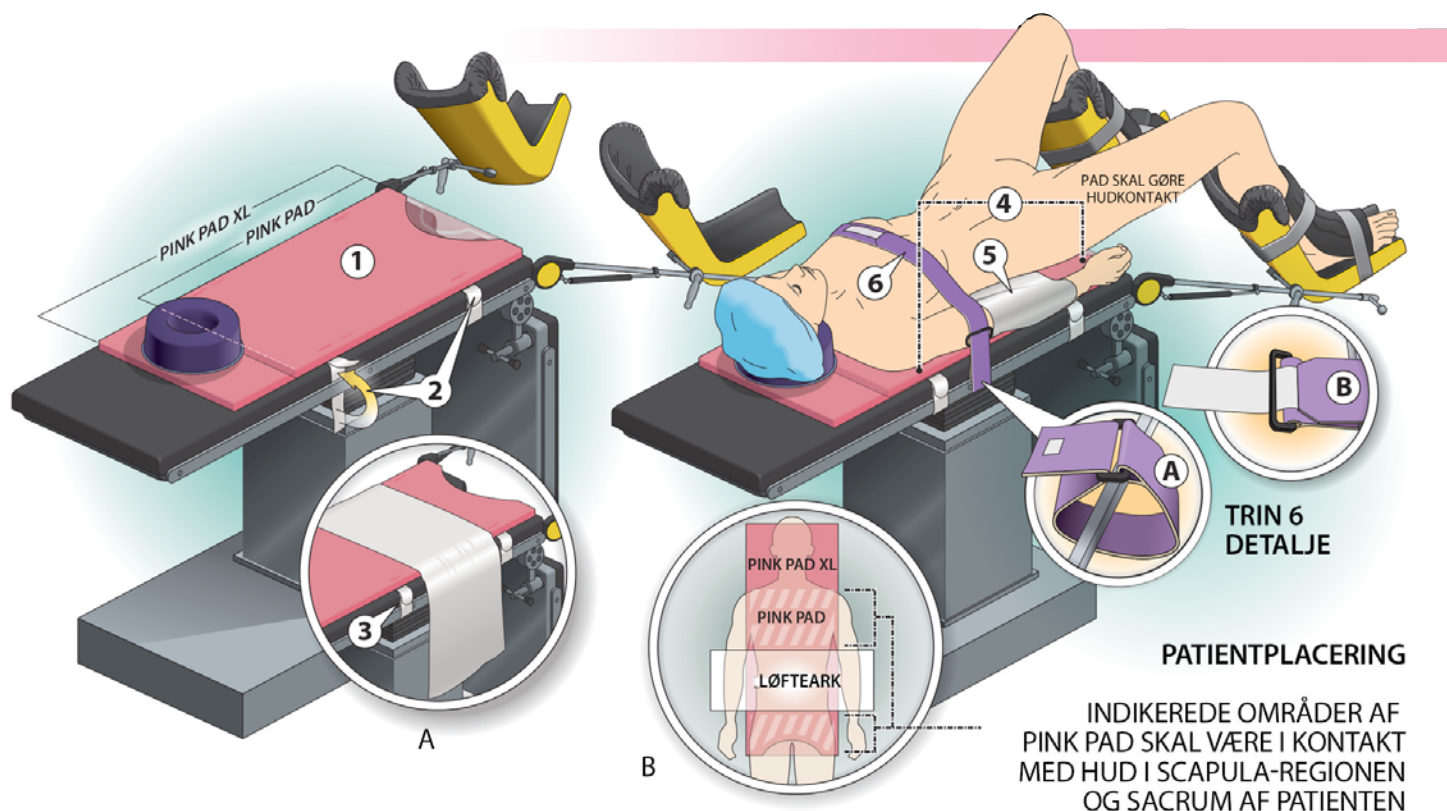

1. Placer Pink Pad helt yderst på selve kanten af det midterste lejesegment tættest på bækkenet. Placer Pink Pad således at de hvide velcrobånd på undersiden er i direkte kontakt med lejets overflade. Bemærk.: Der må ikke benyttes nogen former for lejeafdækning mellem lejet og Pink Pad. Pink Pad skal være i direkte kontakt med lejets madras. Mærket med "This side up" skal pege opad.
2. Før de hvide velcrostropper nedenunder skinnerne på lejet, som vist, og fastgør ved hjælp af velcroen.
3. Placer løftestykket på Pink Pad mellem velcrobåndene som vist på illustrationen (A). Løftestykket skal dække den del af Pink Pad, der ligger ned mod den nedre del af patientens ryg - over sacrum og under scapularegionen
4. Følg klinikens rutiner for intubation. Placer derefter patienten korrekt på Pink Pad.
VIGTIGT – Patienten placeres således at huden over sacrum og scapula har direkte kontakt med Pink Pad, som vist i figur (B). Brug det medfølgende løftestykke til at flytte patienten opad eller nedad på Pink Pad for at opnå korrekt positionering. Træk ikke patienten henover Pink Pad, løft. Sørg for, at Pink Pad forbliver helt flad hele tiden.
5. Placer armene som på billedet eller i overensstemmelse med afdelings regler.
6. Fastgør brystremmen som følger: Se illustration A og B.
 - A. Træk remmen med det lille velceostykke omkring radialkinnen og gennem spændet.
 - B. Gentag ovenstående trin på den anden side af lejet med den anden del af remmen med velcrostykket pegende nedad. Spænd henover patientens bryst.

Opmærksomhed:

1. Før du bruger Pink Pad, skal du sørge for, at sengens madras er fastgjort til lejet.
2. Sørg for at følge afdelingens retningslinjer for patientovervågning. Kontroller at patientens hud er intakt og der er god cirkulation. Produktet må kun benyttes af autoriserede sundhedspersonale.
3. Under brug og opbevaring: Pink Pad skal på ALLE tidspunkter under brug og opbevaring holdes flad. Den må ikke rulles eller foldes.