

Bruksanvisning: Pink Pad®

LÄS FÖLJANDE INFORMATION NOGGRANT INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS.

BESKRIVNING

Pink Pad är ett engångssystem avsett för användning vid kirurgiska ingrepp. Systemet består av en patenterad formulering för den rosa skumdyna, ett icke-vävt lyftlakan, kroppsselar, huvudstöd och stövelinlägg.

INDIKATIONER

Pink Pad är en icke-steril engångsprodukt som används under operation för att skydda patienten mot skador.

AVSEDD ANVÄNDNING OCH ANVÄNDARE

Pink Pad är avsedd att användas endast av utbildad sjukvårdspersonal.

KONTRAINDIKATIONER


Pink Pad är inte konstruerad, såld eller avsedd för annan användning än den som anges.

KUNSKAP OCH ANVÄNDNING

Professionell användning kräver kännedom om denna bruksanvisning. Användningen av enheten är begränsad till operationssalar på sjukhus eller kirurgiska kliniker.

KLINISKA FÖRDELAR

Att bistå sjukhus med en säker och effektiv metod för att hantera patienter med avseende på trycksår och för att motverka oönskade rörelser hos patienter i Trendelenburgposition.

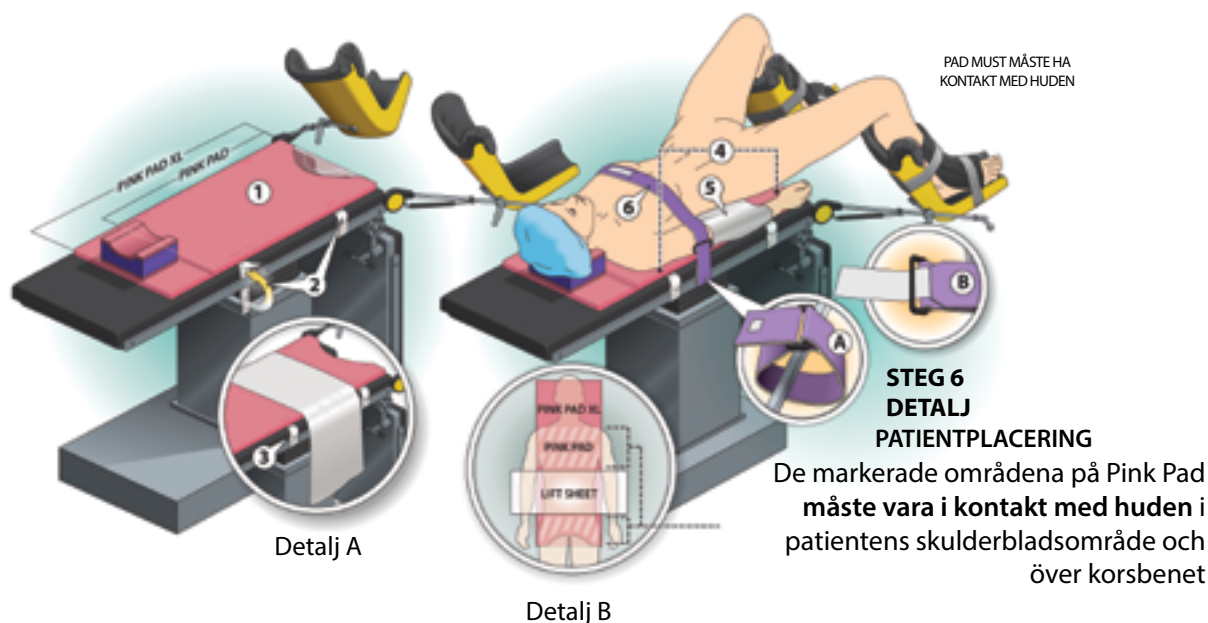

FÖRBEREDELSE OCH ANVÄNDNING

1. Placera Pink Pad längst ut på mittensektionen av operationsbordet, närmast det perineala urtaget. Placera de vita kardborreremmarna på undersidan av Pink Pad i direkt kontakt med ytan på bordsdynan. VIKTIGT: Använd inte några bordsöverdrag, lakan, andra förflyttningshjälpmedel eller material mellan Pink Pad och operationsbordets yta. Pink Pad måste ha direktkontakt med ytan på bordsdynan. Etiketterna "This Side Up" ska vara vända uppåt.
2. Fäst de vita kardborreremmarna från Pink Pad vid operationsbordets sidoskenor genom att föra dem under skenan, enligt bild, och fästa ändarna i varandra.
3. Lägg lyftlakanet ovanpå dynan, centrerat mellan kardborreremmarna (se Detalj A). Lyftlakanet ska endast täcka den del av dynan som stödjer patientens svank – nedanför skulderbladsområdet och ovanför korsbenet
4. Följ sjukhusets riktlinjer för intubering. Positionera därefter patienten korrekt på dynan. VIKTIGT – PATIENTENS HUD MÅSTE HA DIREKT KONTAKT MED PINK PAD. Huden i skulderbladsområdet och över korsbenet måste vara i kontakt med dynans yta (se Detalj B). Använd det medföljande lyftlakanet för att försiktigt lyfta upp patienten från dynan för ompositionering vid behov, exempelvis för säker och korrekt applicering av benstöd. Dra inte patienten på dynan. Dynan ska alltid förbli helt platt.

5. Placera armarna som visas eller enligt sjukhusets riktlinjer.
6. Fäst kroppsremmen enligt följande:
 - A. Placera bältesdelen med den lilla kardborrfyrkanten runt bordets tillbehörsskena och genom spännet.
 - B. Upprepa steget på andra sidan av bordet med den återstående bältesdelen, med kardborrens "hake"-sida vänd nedåt. Fäst remmarna i varandra

KASSERING

- Efter användning ska Pink Pad kasseras i enlighet med sjukhusets riktlinjer

VARNING

- Denna produkt är konstruerad, testad och tillverkad för engångsbruk på en patient. Återanvändning eller reprocessning kan leda till funktionsfel eller skada
- Reprocessning av produkten kan medföra risk för kontaminering och infektion hos patienten.
- Produkten får inte återanvändas eller reprocessas.
- Efter användning ska Pink Pad kasseras i enlighet med sjukhusets riktlinjer.
- Pink Pad ska förvaras på en ren och torr plats i rumstemperatur före användning. Undvik långvarig exponering för förhöjda temperaturer.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Pink Pad ska användas i enlighet med bruksanvisningen samt med beaktande av eventuella kontraindikationer, varningar eller försiktighetsåtgärder som angetts av tillverkaren av tillhörande utrustning.
- Innan Pink Pad används, säkerställ att operationsbordets madrass är ordentligt fastsatt på bordet, samt att den är ren och fri från rester.
- Följ verksamhetens riktlinjer och rutiner för hur ofta patienten ska övervakas. Kontrollera om huden visar tecken på trycksador samt att cirkulationen fungerar som den ska. Produkten får endast användas av legitimerad sjukvårdspersonal.
- Pink Pad ska skyddas från kontakt med hudinfektionsmedel och andra förberedelselösningar.
- Användare och/eller patienter uppmärksammas på att allvarliga incidenter kopplade till denna produkt ska rapporteras till behörig myndighet i det EU-land där användaren och/eller patienten är verksam, samt till Xodus Medical och dess auktoriserade representant.

TEKNISK SPECIFIKATION

- Tillverkningsmaterialet inkluderar:
 - » Polyuretanskum, syntetiskt lim, nylonrem
- Hållbarhet – obegränsad

FÖRVARING, TRANSPORT OCH ANVÄNDNINGSFÖRHÅLLANDEN

- Pink Pad ska förvaras på en ren och torr plats i rumstemperatur före användning. Undvik långvarig exponering för förhöjda temperaturer.
- Under all hantering och förvaring ska underlaget hållas plant. Rulla eller vik inte produkten.



Non-Sterile



Medical Device



Consult Electronic
Instructions for Use




Do Not Re-use



Not Made with Natural
Rubber Latex



Do Not Use If The
Package Is Damaged
Or Opened

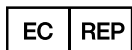

Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



MADE IN THE
USA

702 Prominence Drive
New Kensington, PA 15068,
United States

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com
Tel: +1-724-337-5500

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITCOMBO004 R0 7/14/2025