

Gebrauchsanweisung: Das Pink Pad®

LESEN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.

BESCHREIBUNG

Das Pink Pad ist ein Einwegsystem für chirurgische Eingriffe, bei denen eine Trendelenburg-Patientenlagerung erforderlich ist. Das System besteht aus einem Pink Pad (proprietäre Formulierung), einem Vlies-Hebetuch, Körpergurten und (optional) einem Kopfpositionierer und Armschützer.

INDIKATIONEN

Das Pink Pad ist ein unsteriles Produkt zum Einmalgebrauch, das bei Operationen zum Schutz von Patienten vor Verletzungen verwendet wird.

ANWENDUNGSZWECK UND BENUTZER

Dieses Hilfsmittel darf nur von geschultem medizinischem Fachpersonal verwendet werden.

KONTRAINDIKATIONEN


Dieses Hilfsmittel darf nur für die angegebenen Zwecke verwendet werden, wird nur dafür verkauft und ist nur für diese vorgesehen.

KENNTNISSE UND ANWENDUNG

Zur fachgerechten Anwendung muss diese Gebrauchsanweisung bekannt sein. Die Verwendung des Hilfsmittels ist auf den chirurgischen Operationssaal eines Krankenhauses oder Operationszentrums beschränkt.

KLINISCHE VORTEILE

Unterstützung von Krankenhauseinrichtungen bei der Bereitstellung einer sicheren und wirksamen Methode zur Behandlung des Patienten bei Druckgeschwüren und Immobilität für Patienten in der Trendelenburg-Position.

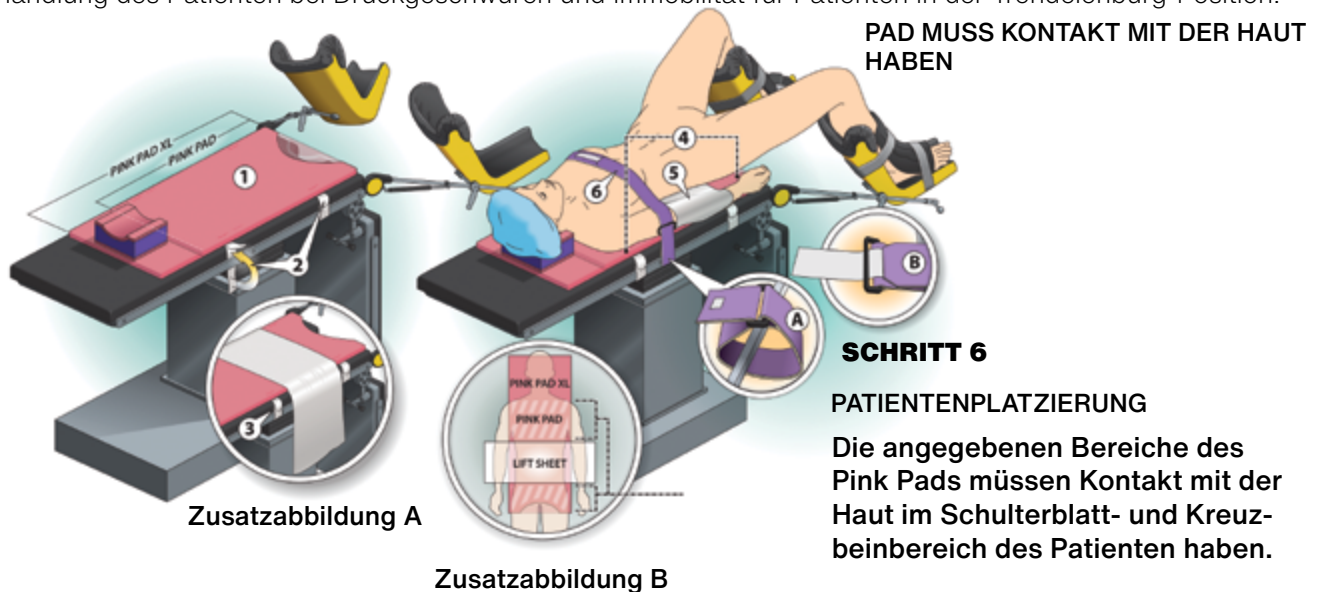

VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

1. Platzieren Sie das Pink Pad am äußersten Rand des mittleren Tischsegments, das dem Dammausschnitt am nächsten liegt, und ordnen Sie die weißen Klettbänder an der Unterseite des Pink Pad direkt auf die Oberfläche des Tischpolsters an. WICHTIG: Verwenden Sie KEINE Tischbezüge, Laken, andere Transfermittel oder Materialien zwischen dem Pink® Pad und der Oberfläche des Operationstisches. Der Pink Pad muss die Oberfläche der Tischunterlage berühren. Die „This Side Up“-Kennzeichen müssen nach oben zeigen.
2. Bringen Sie die weißen Klettbänder des Pink Pad an den OP-Bettschienen an, indem Sie diese unter die Schiene legen, wie abgebildet, und die Enden des jeweiligen Klettverschlusses aneinander befestigen.
3. Legen Sie das Hebetuch wie abgebildet (Zusatzabbildung A) mittig zwischen die Klettbänder über das Pad. Das Hebetuch sollte nur den Teil des Pads bedecken, der für das Kreuz des Patienten (zwischen den Schulterblättern und dem Kreuzbein) vorgesehen ist.
4. Befolgen Sie für die Intubation das Krankenhausprotokoll. Anschließend den Patienten richtig auf dem Pad positionieren. WICHTIG – DIE HAUT DES PATIENTEN MUSS IN DIREKTEM KONTAKT MIT DEM PINK PAD STEHEN. WICHTIG – Die Haut des Schulterblattbereichs und des Kreuzbeins muss die Pad-Oberfläche berühren. Das mitgelieferte Hebetuch verwenden, um den Patienten vorsichtig nach oben und von der Unterlage zu heben, um ihn nach Bedarf neu zu positionieren. Den Patienten nicht auf dem Pad ziehen. Sorgen Sie dafür, dass das Pad immer komplett flach bleibt. Legen Sie die Arme wie gezeigt oder gemäß dem Krankenhausprotokoll um.

5. Den Körpergurt wie folgt anbringen:
 - F. Legen Sie das Gurtteil mit dem kleinen Klettverschluss um die Zubehörschiene des Tisches und durch die Gurtschnalle.
 - G. Wiederholen Sie den obigen Schritt auf der anderen Seite des Tisches mit dem verbleibenden Gurtteil, wobei die Hakenseite des Klettverschlusses nach unten zeigt. Verbinden Sie die Gurte miteinander.

ENTSORGUNG

- Nach Gebrauch sollte das Pink Pad gemäß den Richtlinien des Krankenhauses entsorgt werden.

WARNHINWEISE

- Dieses Hilfsmittel wurde nur zum Gebrauch für einen Patienten entwickelt, getestet und hergestellt. Die Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung dieses Hilfsmittels kann zu dessen Versagen oder nachfolgenden Verletzungen führen.
- Die Wiederaufbereitung dieses Hilfsmittels beinhaltet das Risiko einer Kontamination und Infektion des Patienten.
- Dieses Hilfsmittel nicht wiederverwenden oder wiederaufbereiten.
- Nach Gebrauch sollte das Pink Pad gemäß den Richtlinien des Krankenhauses entsorgt werden.
- Das Pink Pad sollte vor der Verwendung an einem sauberen, trockenen Ort bei Raumtemperatur gelagert werden. Nicht über längere Zeit erhöhten Temperaturen aussetzen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Das Pink Pad sollte gemäß der Gebrauchsanweisung und allen Kontraindikationen, Warnungen oder Vorsichtsmaßnahmen des Herstellers des zugehörigen Instruments verwendet werden.
- Stellen Sie vor Verwendung des Pink Pad sicher, dass der OP-Tisch-Pad sicher am OP-Tisch befestigt, sauber und rückstandsfrei ist.
- Halten Sie die Richt- und Leitlinien Ihrer Einrichtung in Bezug auf die Häufigkeit der Patientenüberwachung ein. Überprüfen Sie die Haut auf Unversehrtheit und einwandfreie Durchblutung. Das Produkt darf nur von einem approbierten Arzt verwendet werden.
- Achten Sie darauf, das Pink Pad vor der Einwirkung von Antiseptika-Lösungen zu schützen.
- Hinweis für den Benutzer und/oder Patienten: Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Hilfsmittel auftreten, müssen der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist, sowie Xodus Medical und dem autorisierten Vertreter des Unternehmens gemeldet werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Herstellungsmaterialien sind u. a.:
 - » Polyurethanschaum, synthetischer Kleber, Nylonriemen
- Haltbarkeit – unbegrenzt

LAGERUNGS-, TRANSPORT- UND BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Das Pink Pad sollte vor der Verwendung an einem sauberen, trockenen Ort bei Raumtemperatur gelagert werden. Nicht über längere Zeit erhöhten Temperaturen aussetzen.
- Bei JEDER Handhabung und Lagerung sicherstellen, dass das Pad flach liegt. Nicht rollen oder falten.



Medizinprodukt



xodusmedical.com/eifu

Elektronische
Gebrauchsanweisung
lesen



Nicht verwenden,
wenn die Verpackung
beschädigt oder
geöffnet ist



Nicht
wiederverwenden



Unsteril



Achtung, die
Begleiddokumente
beachten



Emergo Europe
Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
The Netherlands



MedEnvoy Switzerland
Gotthardstrasse 28
6302 Zug
Switzerland



Nicht mit
Naturkautschuklatex
hergestellt



XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



MADE IN THE
USA

702 Prominence Drive
New Kensington, PA 15068,
United States

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com
Tel: +1-724-337-5500

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP005 R7 4/1/2026