

## ISTRUZIONI PER L'USO:

# Cuscinetti per bracciolo PinkProtect™

## **PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI.**

### **DESCRIZIONE**

I cuscinetti per bracciolo PinkProtect™ sono un dispositivo monouso utilizzato nelle procedure chirurgiche. Il dispositivo fornisce una soluzione sicura e delicata sulla pelle per sostenere il braccio del paziente durante le procedure mediche.

### **INDICAZIONI**

I cuscinetti per bracciolo PinkProtect™ sono un dispositivo monouso non sterile da utilizzare durante l'intervento chirurgico per proteggere il braccio, il nervo ulnare e le dita del paziente e prevenire le lesioni.

### **FINALITÀ E UTENTE**

Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di operatori sanitari qualificati.

### **CONTROINDICAZIONI**

Questo dispositivo non è progettato, venduto o destinato ad un uso diverso da quanto qui indicato.

### **CONOSCENZA E UTILIZZO**



L'uso professionale richiede la conoscenza di queste istruzioni per l'uso. L'uso del dispositivo si limita alla sala operatoria chirurgica di un ospedale o di un centro chirurgico.

### **BENEFICI CLINICI**

Aiutare le strutture ospedaliere a fornire un metodo sicuro ed efficace di gestione del paziente per impedire le lesioni durante l'intervento chirurgico.

### **PREPARAZIONE E UTILIZZO**

1. Applicare i cuscinetti per bracciolo PinkProtect™ sulla superficie corrispondente del tavolo operatorio, con il lato rosa rivolto verso l'alto/verso il paziente.
2. Posizionare il braccio del paziente in modo anatomicamente corretto.
3. Utilizzare le cinghie per braccio delicate sulla pelle in dotazione per fissare il braccio del paziente e il cuscinetto per bracciolo PinkProtect™ alla sezione del tavolo operatorio.

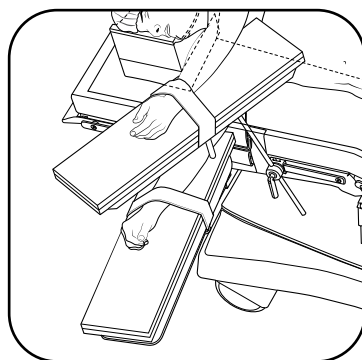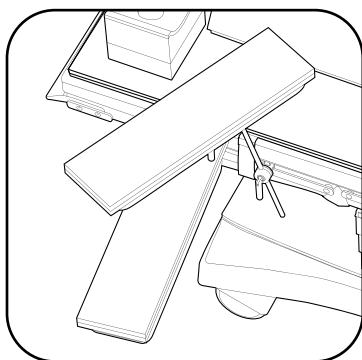

## SMALTIMENTO

- Dopo l'uso, i cuscinetti per bracciolo PinkProtect™ deve essere smaltito in conformità con la politica ospedaliera.

## AVVERTENZE

- Questo dispositivo è stato progettato, testato e prodotto esclusivamente per l'uso su un singolo paziente. Il riutilizzo o il ricondizionamento di questo dispositivo può provocarne il guasto o conseguenti lesioni.
- Il ricondizionamento di questo dispositivo può creare un rischio di contaminazione e infezione del paziente.
- Non riutilizzare o ricondizionare questo dispositivo.
- Dopo l'uso, i cuscinetti per bracciolo PinkProtect™ devono essere smaltiti in conformità con la politica ospedaliera.
- I cuscinetti per bracciolo PinkProtect™ devono essere conservati in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente prima dell'uso. Evitare l'esposizione prolungata a temperature elevate.

## PRECAUZIONI

- I cuscinetti per bracciolo PinkProtect™ devono essere utilizzati in conformità con le istruzioni per l'uso ed eventuali controindicazioni, avvertenze o precauzioni fornite dal produttore del relativo strumento.
- Seguire le politiche e le linee guida della propria struttura per la frequenza del monitoraggio del paziente. Verificare l'integrità della cute e la corretta circolazione sanguigna. Il prodotto deve essere utilizzato solo da operatori sanitari autorizzati.
- Comunicare all'utente e/o al paziente che qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato all'autorità competente del Paese in cui si trova l'utente e/o il paziente, nonché a Xodus Medical e al suo rappresentante autorizzato.

## SPECIFICHE TECNICHE

- I materiali di fabbricazione includono:
  - » Schiuma poliuretanica
- Periodo di validità - Indefinito

## CONDIZIONI DI STOCCAGGIO, TRASPORTO E FUNZIONAMENTO

- I cuscinetti per bracciolo PinkProtect™ devono essere conservati in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente prima dell'uso. Evitare l'esposizione prolungata a temperature elevate.



702 Prominence Drive  
New Kensington, PA 15068,  
United States

xodusmedical.com  
info@xodusmedical.com  
Tel: 1+724-337-5500

REGISTRAZIONE FDA  
CERTIFICATO ISO 13485



LITIFUAM005 R0 1/17/2024