

# GEBRAUCHSANWEISUNG: JACKSON TABLE-POSITIONIERUNGSSET

## LESEN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.

### BESCHREIBUNG

Das Xodus Medical Jackson Table-Positionierungsset ist ein System aus schaumstoffbasierten Komponenten zur Verwendung auf dem Jackson Table bei chirurgischen Eingriffen an der Wirbelsäule.

### INDIKATIONEN

Das Jackson Table-Positionierungsset ist ein unsteriles Einweg-Hilfsmittel zur Verwendung bei chirurgischen Eingriffen.

### ANWENDUNGSZWECK UND BENUTZER

Dieses Hilfsmittel ist für die Verwendung durch geschultes medizinisches Fachpersonal auf einem Jackson Table vorgesehen, um Hautverletzungen des Patienten während chirurgischer Eingriffe zu verhindern.

### KONTRAINDIKATIONEN

Dieses Hilfsmittel darf nur für die angegebenen Zwecke verwendet werden, wird nur dafür verkauft und ist nur für diese vorgesehen.

### KENNTNISSE UND ANWENDUNG


Zur fachgerechten Anwendung muss diese Gebrauchsanweisung bekannt sein. Die Verwendung des Hilfsmittels ist auf den chirurgischen Operationssaal eines Krankenhauses oder Operationszentrums beschränkt.

### KLINISCHE VORTEILE

Das Jackson Table-Positionierungsset schützt die Haut des Patienten während des chirurgischen Eingriffs.

### VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

1. Hinweis: Das Set enthält möglicherweise nicht alle unten aufgeführten Produkte.
2. Platzieren Sie jede Armhalterung auf dem entsprechenden Armbrettpolster (links; rechts) und achten Sie darauf, dass die Ausschnitte nach außen zeigen, um den gesamten Arm zu stützen.
3. Legen Sie die Torso-Lift-Hülle fest über das Brustpolster. Die DermaProx-Schicht muss nach oben zeigen, um direkten Hautkontakt zu ermöglichen.
4. Legen Sie die Hüft-/Oberschenkelhüllen fest über die vier Hüft- und Oberschenkelpolstern. Stellen Sie bei der Verwendung von DermaProx-Überzügen sicher, dass das DermaProx nach oben zeigt, um direkten Hautkontakt zu ermöglichen.
5. Zentrieren Sie die Kopfstütze auf der Kopfstützplatte und sorgen Sie dafür, dass die ovale Öffnung der Kopfstütze korrekt an der Oberseite des Tisches ausgerichtet ist und die DermaProx-Schicht nach oben zeigt.

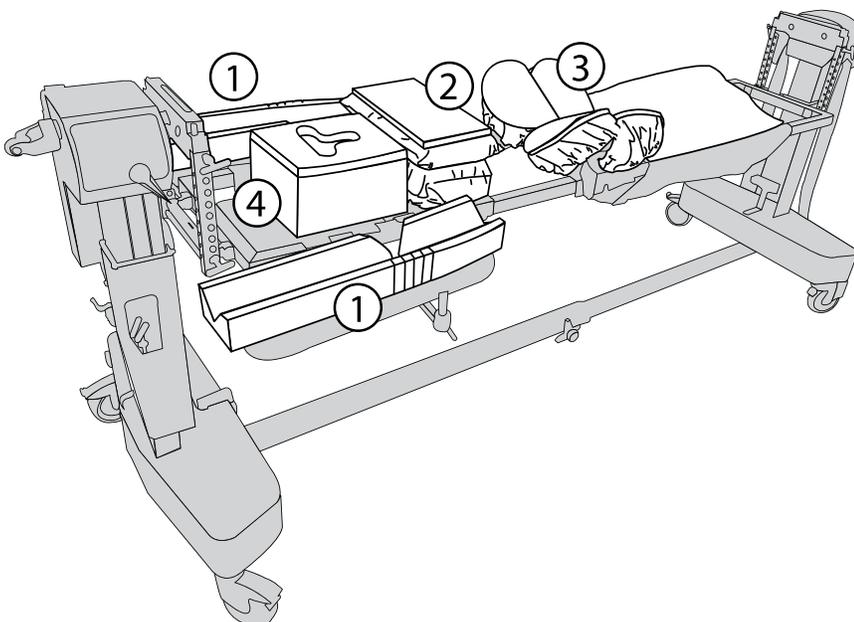

## ENTSORGUNG

- Nach Gebrauch sollte das Jackson Table Positionierungsset gemäß den Krankenhausrichtlinien entsorgt werden.

## WARNHINWEISE

- Dieses Hilfsmittel wurde nur zum Gebrauch bei einem Patienten entwickelt, getestet und hergestellt. Die Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung dieses Hilfsmittels kann zu dessen Versagen oder nachfolgenden Verletzungen führen.
- Die Wiederaufbereitung dieses Hilfsmittels kann das Risiko einer Kontamination und Infektion des Patienten mit sich bringen.
- Dieses Hilfsmittel nicht wiederverwenden oder wiederaufbereiten.
- Nach Gebrauch sollte das Jackson Table Positionierungsset gemäß den Krankenhausrichtlinien entsorgt werden.
- Das Jackson Table-Positionierungsset sollte vor der Verwendung an einem sauberen, trockenen Ort bei Raumtemperatur gelagert werden. Nicht über längere Zeit erhöhten Temperaturen aussetzen.
- Bitte überprüfen Sie die Unversehrtheit der Verpackung vor den Gebrauch visuell. Nicht verwenden, wenn diese beschädigt, geöffnet oder nicht intakt ist.
- Gemäß US-Bundesgesetz darf dieses Hilfsmittel nur von einem Arzt bzw. auf Anordnung eines Arztes verkauft werden.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

- Das Jackson Table-Positionierungsset sollte gemäß der Gebrauchsanweisung und allen Kontraindikationen, Warnungen oder Vorsichtsmaßnahmen des Herstellers des entsprechenden Geräts verwendet werden.
- Hinweis für den Benutzer und/oder Patienten: Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Hilfsmittel auftreten, müssen der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist, sowie Xodus Medical und dem autorisierten Vertreter des Unternehmens gemeldet werden.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Herstellungsmaterialien sind u. a.:
  - » Polyurethanschaum
- Haltbarkeit – unbegrenzt

## LAGERUNGS-, TRANSPORT- UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Das Jackson Table-Positionierungsset sollte vor der Verwendung an einem sauberen, trockenen Ort bei Raumtemperatur gelagert werden. Nicht über längere Zeit erhöhten Temperaturen aussetzen.



702 Prominence Drive Tel. +1-724.337.5500  
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

FDA-REGISTRIERT  
ISO 13485-ZERTIFIZIERT

[xodusmedical.com](http://xodusmedical.com) | [info@xodusmedical.com](mailto:info@xodusmedical.com)

LITIFUJF005 R0 3/13/2024