

# ISTRUZIONI PER L'USO: PINK ARCS

## PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI.

### DESCRIZIONE

Pink Arcs è un dispositivo monouso utilizzato nelle procedure chirurgiche. L'uso previsto di Pink Arcs è quello di fornire protezione, corretto posizionamento chirurgico e ammortizzazione durante il posizionamento chirurgico dei pazienti e prevenire le lesioni causate da pressione.

### INDICAZIONI

Pink Arcs è un dispositivo monouso non sterile da utilizzare durante l'intervento chirurgico per fornire protezione, corretto posizionamento chirurgico e ammortizzazione nella prevenzione di lesioni al paziente.

### FINALITÀ E UTENTE

Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso da parte di operatori sanitari qualificati.

### CONTROINDICAZIONI

Questo dispositivo non è progettato, venduto o destinato ad un uso diverso da quanto qui indicato.

### CONOSCENZA E UTILIZZO




L'uso professionale richiede la conoscenza di queste istruzioni per l'uso. L'uso del dispositivo si limita alla sala operatoria chirurgica di un ospedale o di un centro chirurgico.

### BENEFICI CLINICI

Fornisce protezione, corretto posizionamento chirurgico e ammortizzazione per la prevenzione delle lesioni del paziente durante le procedure chirurgiche.

### PREPARAZIONE E UTILIZZO

- Pink Arcs può essere utilizzato per una varietà di esigenze di posizionamento per necessità chirurgiche.
- Posizionare Pink Arcs a diretto contatto con la pelle per sfruttare le caratteristiche uniche di morbidezza, immersione e avvolgimento per proteggere dalle lesioni dovute alla posizione.
- Assicurarsi di controllare continuamente l'integrità della pelle del paziente e la corretta circolazione.
- Scegliere tra diverse dimensioni di Pink Arcs per garantire una distribuzione della pressione ottimale specifica per la procedura chirurgica e la popolazione di pazienti.
- Seguire le politiche e le linee guida della propria struttura per la frequenza del monitoraggio del paziente.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo da operatori sanitari autorizzati.
- È necessario prestare attenzione per proteggere Pink Arcs dall'esposizione alle soluzioni di preparazione.

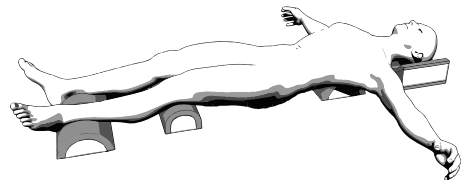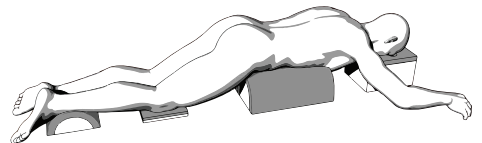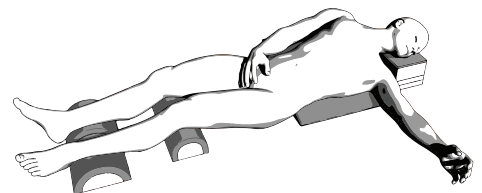

## SMALTIMENTO

- Dopo l'uso, Pink Arcs deve essere smaltito in conformità con la politica ospedaliera.

## AVVERTENZE

- Questo dispositivo è stato progettato, testato e prodotto esclusivamente per l'uso su un singolo paziente. Il riutilizzo o il ricondizionamento di questo dispositivo può provocarne il guasto o conseguenti lesioni.
- Il ricondizionamento di questo dispositivo può creare un rischio di contaminazione e infezione del paziente.
- Non riutilizzare o ricondizionare questo dispositivo.
- Dopo l'uso, Pink Arcs deve essere smaltito in conformità con la politica ospedaliera.
- Verificare l'integrità della cute e la corretta circolazione sanguigna.
- Pink Arcs deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente prima dell'uso. Evitare l'esposizione prolungata a temperature elevate.

## PRECAUZIONI

- Pink Arcs deve essere utilizzato solo in ambito perioperatorio.
- Pink Arcs deve essere utilizzato in conformità con le istruzioni per l'uso ed eventuali controindicazioni, avvertenze o precauzioni fornite dal produttore del relativo strumento.
- Seguire le politiche e le linee guida della propria struttura per la frequenza del monitoraggio del paziente.
- Comunicare all'utente e/o al paziente che qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato all'autorità competente del Paese in cui si trova l'utente e/o il paziente, nonché a Xodus Medical e al suo rappresentante autorizzato.

## SPECIFICHE TECNICHE

- I materiali di fabbricazione includono:
  - » Schiuma poliuretanica
- Periodo di validità - Indefinito

## CONDIZIONI DI STOCCAGGIO, TRASPORTO E FUNZIONAMENTO

- Pink Arcs deve essere conservato in un luogo pulito e asciutto a temperatura ambiente prima dell'uso. Evitare l'esposizione prolungata a temperature elevate.



702 Prominence Drive  
New Kensington, PA 15068,  
United States

xodusmedical.com  
info@xodusmedical.com  
Tel: 1+724-337-5500

FDA REGISTERED  
ISO 13485 CERTIFIED



PRODOTTO NEGLI  
STATI UNITI

LITIFUPA004 R0 01/10/2024