


THE PINK PAD

Fortschrittliches Trendelenburg- / Anti-Trendelenburg-Patientenlagerungssystem

Instructions for Use

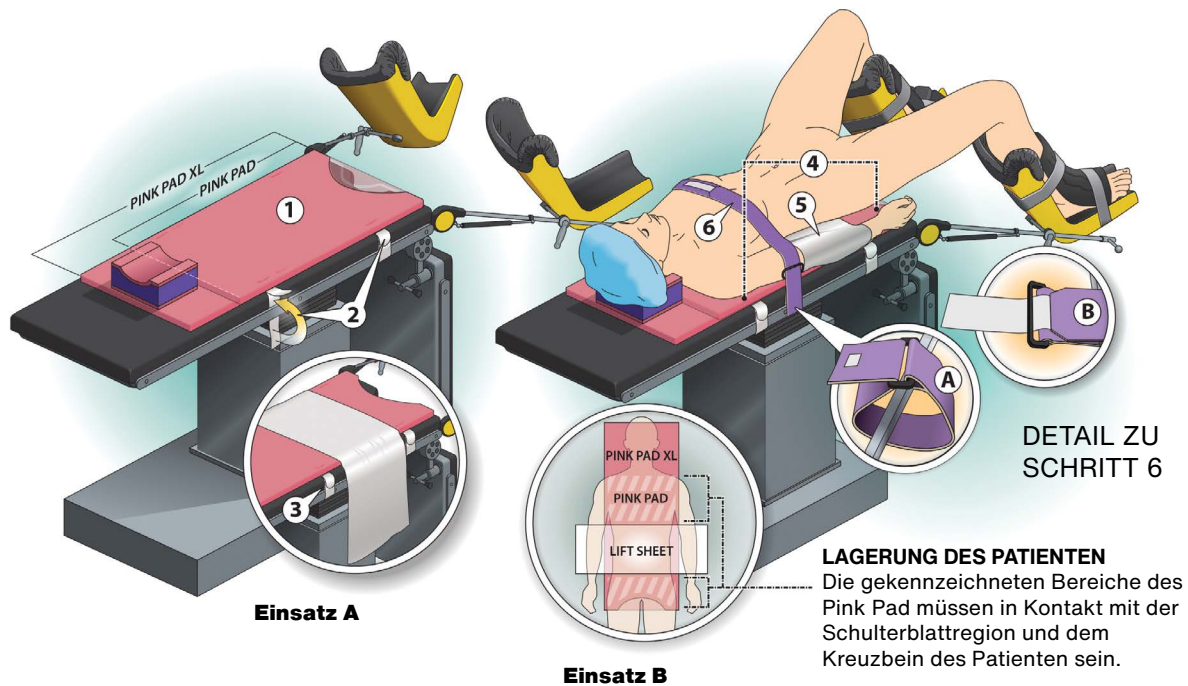

1. Das Pink Pad am distalen Ende des Mittelteils des OP-Tisches auf diesen auflegen, wie rechts dargestellt. Die weißen Klettbinden müssen sich auf der vom Patienten abgewandten Unterseite des Pink Pad befinden. Die Beschriftung "This Side Up" (diese Seite nach oben) muss nach oben weisen.
2. Die weißen Klettverschlussbänder an den Schienen des OP-Tisches befestigen, indem sie wie dargestellt unter den Schienen durchgeführt werden. Dann werden die Enden der Klettverschlussbänder miteinander verbunden.
3. Das Gleittuch wie dargestellt über das Pink Pad legen. Das Gleittuch sollte nur den Teil des Pink Pad abdecken, auf dem die Taille des Patienten liegt, d. h. den Bereich von unterhalb der Schulterblätter bis oberhalb des Kreuzbeins.
4. Beim Intubieren sind die Verfahren der Klinik zu beachten. Dann den Patienten ordnungsgemäß auf dem Pink Pad lagern. **WICHTIG:** Der Patient muss so gelagert werden, dass seine Schultern nicht über den Rand des Pink Pad hinausragen. **WICHTIG:** Die Haut im Bereich von Schultern und Kreuzbein muss wie dargestellt in Kontakt mit der Oberfläche des Pink Pad sein. Das mitgelieferte Gleittuch verwenden, um den Patienten ggf. vorsichtig vom Pink Pad abzuheben und umzulagern, wenn dies für die geeignete und sichere Einstellung der Beinhalter erforderlich ist. Den Patienten nicht auf dem Pink Pad ziehen. Sicherstellen, dass das Pink Pad immer vollständig flach liegt.
5. Die Arme wie dargestellt oder gemäß Lagerungsverfahren der Klinik lagern.
6. Den dem Produkt beiliegenden Körpergurt wie folgt befestigen:
 - A. Den Gurt um den OP-Tisch bzw. den Rahmen des OP-Tisches und durch die Schnalle führen Sicherstellen, dass die Kletthaken nach oben zeigen. Die glatte Seite muss stets zum Patienten weisen.
 - B. Den obigen Schritt mit dem anderen Gurt wiederholen. Hierbei muss das Kletthakenrechteck nach unten weisen und um die andere Seite des OP-Tisches bzw. des Rahmens des OP-Tisches und durch die Schnalle geführt werden.

ACHTUNG:

1. Die Richtlinien und Vorgaben der Klinik im Hinblick auf die Häufigkeit der Patientenüberwachung sind unbedingt zu beachten. Die Haut ist auf Verletzungen und ordnungsgemäße Durchblutung zu überprüfen. Das Produkt darf ausschließlich von medizinischen Fachkräften verwendet werden.
2. Handhabung und Aufbewahrung: Während der Handhabung des Pink Pad und bei seiner Aufbewahrung muss es IMMER flach liegen. Das Pink Pad darf nicht eingerollt oder gefaltet werden, da dies Schäden verursachen kann.
3. Es ist darauf zu achten, dass das Pink Pad nicht vorbereiteten Lösungen ausgesetzt wird.
4. Handhabung und Lagerung: Stellen Sie während ALLER Handhabung und Lagerung sicher, dass das Pad flach ist. Rollen oder falten Sie das Pad nicht.

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™

702 Prominence Drive
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A. Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

U.S Patents

8,464,720; 8,511,314;
9,161,876; 9,750,656;
9,782,287

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

European Patent

EP 2 802 305 B1

Patentes
adicionales
pendientes

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITIFUPP005 R5 9/2/2021

