

Pink Hip Kit™ -H & DermaProx™

Mode d'emploi

Chausson de botte - H

Système de positionnement postless pour la hanche

Description de l'appareil

Le Pink Hip Kit - H est conçu pour être utilisé avec la Table Hana® et empêche le mouvement du patient sur la table d'opération pendant les procédures arthroscopiques de la hanche.

Le Pink Hip Kit - H est à usage unique et doit être éliminé une fois l'intervention chirurgicale terminée.

Le Pink Hip Kit - H (Figure 1) se compose des éléments suivants :

- A. Appuie-tête (1)
- B. Pink Hip Pad (1)
- C. Fixe corps (1)
- D. Toile de levage (1)
- E. Sangles de bras (1 paire)
- F. Coussinets de bras (1 paire)
- G. Couvercle de joint à rotule (2)

Le kit Pink Hip - H et les chaussons de bottes DermaProx - H se composent de : Composants du Kit Pink Hip - H ci-dessus ainsi que les suivants :

- H. Chausson de botte DermaProx™ (1 paire)

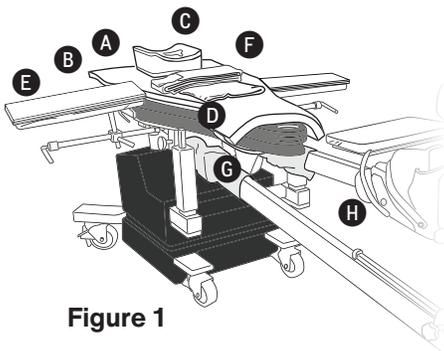


Figure 1

Utilisateurs concernés

Le Pink Hip Kit - H est destiné à être utilisé par des professionnels de la santé conformément à ce mode d'emploi. L'environnement d'utilisation est un établissement de santé professionnel.

Usage prévu

Le Pink Hip Kit - H est conçu pour être utilisé avec la Table Hana® et empêche le mouvement du patient sur la table pendant les interventions arthroscopiques de la hanche.

Les chaussons de bottes DermaProx - H sont conçus pour être utilisés avec la table Hana pour amortir les chocs et protéger le pied lorsque la traction est exercée, et pour minimiser le glissement du pied et du talon pendant les procédures d'arthroscopie de la hanche.

Mode d'emploi

Le kit Pink Hip et le chausson de botte DermaProx - H sont indiqués pour positionner les patients pendant les procédures arthroscopiques de la hanche.

Groupes de patients ciblés

Ce dispositif s'adresse aux patients pour lesquels une arthroscopie de la hanche est jugée nécessaire par le chirurgien.

Contre-indications

- Aucune

Mises en garde

- Il incombe au prestataire de soins de se familiariser avec le mode d'emploi des produits et de former le personnel de santé concerné.
- L'utilisation du produit en dehors des indications ou de l'utilisation prévues est interdite. Les modifications du produit peuvent modifier les résultats attendus.

Précautions

- Inspectez l'emballage du produit avant de l'ouvrir. Si l'emballage du produit est endommagé ou perforé, **NE PAS UTILISER**.
- Inspectez le produit et son contenu au moment du déballage. Si le produit est endommagé ou défectueux, **NE L'UTILISEZ PAS** et contactez immédiatement le fabricant pour obtenir de l'aide.
- Soyez prudent lors du positionnement des patients chirurgicaux. Ne faites pas glisser les patients sur la surface du Pink Hip Pad, cela pourrait endommager le produit et nuire à son fonctionnement.

Instructions


1. Placez le Pink Hip Pad sur la section périnéale de la table de manière à ce que le Pink Hip Pad soit en contact direct avec la surface de la table (*Figure 2*). Positionnez les bandes Velcro blanches sous le Pink Hip Pad de sorte que l'étiquette « This Side Up » soit tournée vers le haut.

Figure 2



2. Attachez les sangles Velcro blanches aux barrières du lit chirurgical en les enroulant sous la barrière et en attachant les extrémités du Velcro ensemble. (*Figure 3*)
3. Sous la table chirurgicale en plaçant d'abord l'extrémité la plus longue sous la table, puis en superposant l'extrémité la plus longue de la sangle sur sa partie la plus courte. Veillez à appuyer fermement le tissu blanc à crochets de l'extrémité la plus courte de la sangle sur la partie la plus longue pour la fixer en place. (*Figure 4*)

Figure 3

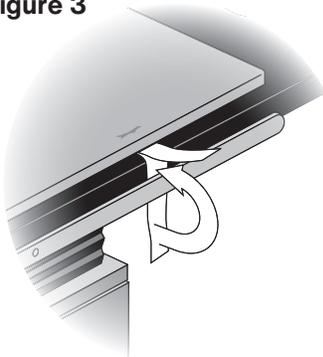

4. Posez la toile de levage sur le coussin, centrée entre les sangles Velcro. La toile de levage ne doit couvrir que la partie du coussin qui se trouvera au niveau du bas du dos du patient, entre les omoplates et le sacrum (*Figure 1*).
5. Placez l'appuie-tête sur le Pink Hip Pad™ à un emplacement permettant un bon positionnement de la tête du patient.

Figure 4


Vue de sous la table



Sangles de coussin violettes attachées à la table.

6. Transférez le patient sur le Pink Hip Pad. Positionnez le patient comme suit :
 - L'épine iliaque antéro-supérieure (EIAS) du patient doivent être positionnées directement sur les languettes d'alignement. (*Figure 5*)
 - Assurez-vous que les épaules ne dépassent pas du bord supérieur du Pink Hip Pad, afin d'optimiser le contact avec la peau.
 - La peau de la région des omoplates et du sacrum doit entrer en contact avec la surface du coussin Pink Hip Pad.
 - Si nécessaire, utilisez la toile de levage pour SOULEVER soigneusement le patient du Pink Hip Pad et le repositionner. Ne faites pas glisser le patient sur le coussin. Assurez-vous que le coussin Pink Hip Pad reste plat à tout moment.


Figure 5

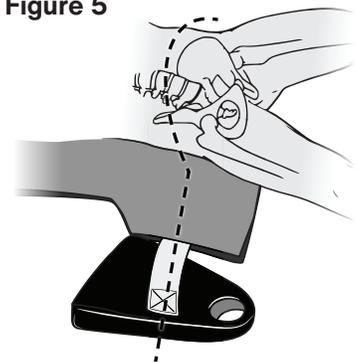

Alignez l'EIAS sur la sangle inférieure du Pink Hip Pad

7. Le cas échéant, insérez les pieds du patient dans les chaussons de botte DermaProx™ comme suit :
 - a. Orientez correctement le chausson. Le bord cousu s'alignera avec la plante du patient. (*Figure 6*)
 - b. Ouvrez les sangles et faites glisser le chausson ouvert sur le pied du patient dans le bon sens. (*Figure 7*)
 - c. Fermez les sangles du chausson sur le pied du patient et assurez-vous que le Velcro blanc est solidement fixé. L'ajustement doit être serré, sans entraver la circulation. (*Figure 7*)
 - d. Répétez les étapes a à c pour l'autre pied.

Figure 6

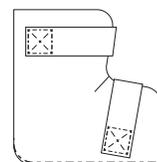

Le bord cousu s'aligne sur la plante du pied.

8. Placez les coussinets de bras sur les bras de la table d'opération.
9. Placez les bras du patient sur les coussinets du support de bras, paumes tournées vers le haut, puis fixez avec les sangles du support de bras (Figure 9)

Figure 7


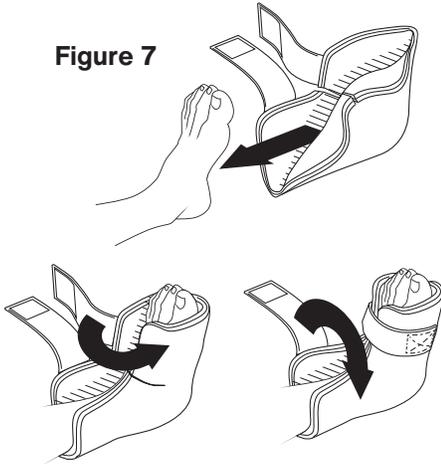


Figure 8

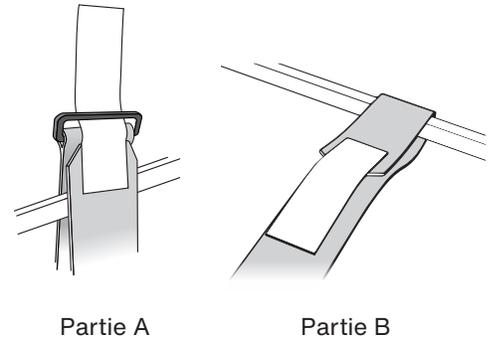


Partie A

Partie B

10. Attachez les sangles du corps (Figure 8) comme suit :
 - a. En commençant par la *partie A*, orientez la sangle de manière à ce que la partie blanche du Velcro présentant des crochets soit tournée vers l'extérieur. Passez la sangle à travers la boucle jusqu'à ce qu'elle soit bien ajustée au rail d'accessoires sur le patient.
 - b. En continuant avec la *partie B*, tirez l'extrémité de la sangle entre la table et le rail pour accessoires, en vous assurant que la partie blanche présentant les crochets est tournée vers l'intérieur. Pressez les morceaux de Velcro blanc à crochets l'un contre l'autre pour les fixer en place.

Figure 9

Configuration terminée avec un patient correctement positionné.

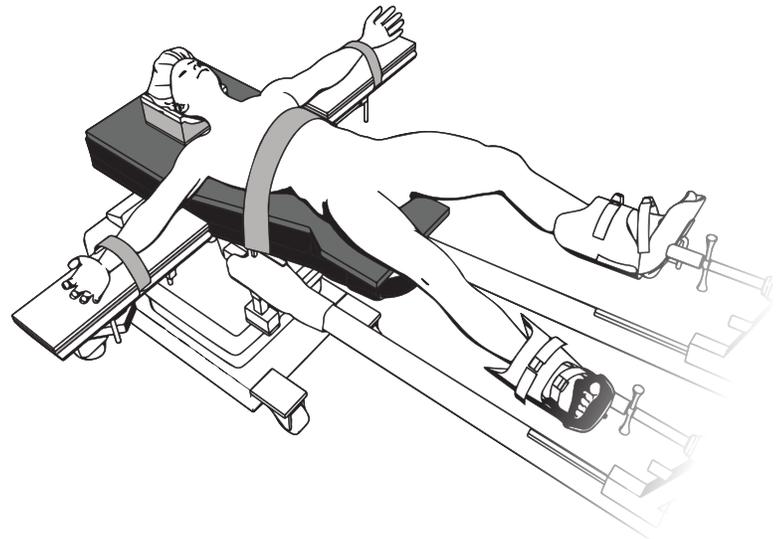

Glossaire des symboles

	Dispositif médical
	Mise en garde
	Fabricant
	Date de fabrication
	Code du lot

	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Ne pas réutiliser
	Sans latex
	Quantité
	Numéro de référence

	Consulter les instructions électroniques d'utilisation
	Non stérile
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne
	Conformité européenne

XODUS MEDICAL
Making Surgery Safer™



702 Prominence Drive | Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel: 724.337.5500
Fax: 724.337.0555

xodusmedical.com
info@xodusmedical.com

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

LITFUPP038 R2 8/31/2022