

# GEBRAUCHSANWEISUNG: Wilson Table™ -Positionierungsset

## LESEN SIE DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.

### BESCHREIBUNG

Das Xodus Medical Wilson Table-Positionierungsset ist ein System aus schaumstoffbasierten Komponenten zur Verwendung auf dem Wilson Table bei chirurgischen Eingriffen an der Wirbelsäule.

### INDIKATIONEN

Das Wilson Table-Positionierungsset ist ein unsteriles Einweg-Hilfsmittel zur Verwendung bei chirurgischen Eingriffen.

### ANWENDUNGSZWECK UND BENUTZER

Dieses Hilfsmittel ist für die Verwendung durch geschultes medizinisches Fachpersonal auf einem Wilson Table vorgesehen, um Hautverletzungen des Patienten während chirurgischer Eingriffe zu verhindern.

### KONTRAINDIKATIONEN

Dieses Hilfsmittel darf nur für die angegebenen Zwecke verwendet werden, wird nur dafür verkauft und ist nur für diese vorgesehen.

### KENNTNISSE UND ANWENDUNG


Zur fachgerechten Anwendung muss diese Gebrauchsanweisung bekannt sein. Die Verwendung des Hilfsmittels ist auf den chirurgischen Operationssaal eines Krankenhauses oder Operationszentrums beschränkt.

### KLINISCHE VORTEILE

Das Wilson Table-Positionierungsset bietet dem Patienten Hautschutz während des wirbelsäulenchirurgischen Eingriffs am Wilson Table.

### VORBEREITUNG UND ANWENDUNG

1. Heben Sie die Rumpfpolster an.
2. Legen Sie das Abdecktuch unter die Rumpfpolster. Stellen Sie sicher, dass das Tuch auf beiden Seiten des Tisches flach und gleichmäßig liegt. Befestigen Sie das Tuch mit den Klebelaschen am Rahmen.
3. Schieben Sie die Überzüge der Rumpfpolster so über jedes Polster, dass das gesamte Polster bedeckt ist. Bringen Sie die Rumpfpolster danach wieder in ihre normale Position zurück. Die DermaProx™-Schicht muss nach oben zeigen, um direkten Hautkontakt zu ermöglichen.
4. Schieben Sie die Abdeckung der Querstange über die Querstange. Achten Sie auf die Schlitzöffnung in der Abdeckung und legen Sie diese über die Stange.
5. Platzieren Sie jede Armhalterung auf der entsprechenden Armplatte (links und rechts) und achten Sie darauf, dass die Ausschnitte zur Unterstützung des Arms nach außen zeigen.
6. Zentrieren Sie die Kopfstütze auf der Kopfstützplatte und stellen Sie sicher, dass die ovale Augenöffnung der Kopfstütze korrekt an der Oberseite des Tisches ausgerichtet ist und die DermaProx-Schicht nach oben zeigt.

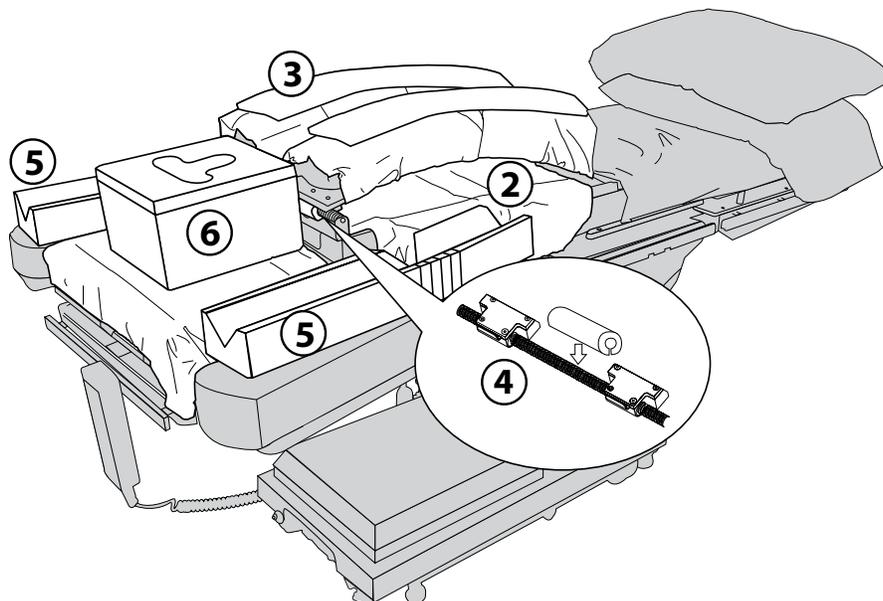

## ENTSORGUNG

Nach Gebrauch sollte das Wilson Table-Positionierungsset gemäß den Krankenhausrichtlinien entsorgt werden.

## WARNHINWEISE

- Dieses Hilfsmittel wurde nur zum Gebrauch bei einem Patienten entwickelt, getestet und hergestellt. Die Wiederverwendung oder Wiederaufbereitung dieses Hilfsmittels kann zu dessen Versagen oder nachfolgenden Verletzungen führen.
- Die Wiederaufbereitung dieses Hilfsmittels kann das Risiko einer Kontamination und Infektion des Patienten mit sich bringen.
- Dieses Hilfsmittel nicht wiederverwenden oder wiederaufbereiten.
- Nach Gebrauch sollte das Wilson Table-Positionierungsset gemäß den Krankenhausrichtlinien entsorgt werden.
- Das Wilson Table-Positionierungsset sollte vor der Verwendung an einem sauberen, trockenen Ort bei Raumtemperatur gelagert werden. Nicht über längere Zeit erhöhten Temperaturen aussetzen.
- Bitte überprüfen Sie die Unversehrtheit der Verpackung vor den Gebrauch visuell. Nicht verwenden, wenn diese beschädigt, geöffnet oder nicht intakt ist.
- Gemäß US-Bundesgesetz darf dieses Hilfsmittel nur von einem Arzt bzw. auf Anordnung eines Arztes verkauft werden.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

- Das Wilson Table-Positionierungsset sollte gemäß der Gebrauchsanweisung und allen Kontraindikationen, Warnungen oder Vorsichtsmaßnahmen des Herstellers des entsprechenden Geräts verwendet werden.
- Hinweis für den Benutzer und/oder Patienten: Alle schwerwiegenden Vorfälle, die im Zusammenhang mit dem Hilfsmittel auftreten, müssen der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist, sowie Xodus Medical und dem autorisierten Vertreter des Unternehmens gemeldet werden.

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Herstellungsmaterialien sind u. a.:
  - » Polyurethanschaum
  - » Polypropylen
- Haltbarkeit – unbegrenzt

## LAGERUNGS-, TRANSPORT- UND ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

- Wilson Table-Positionierungsset sollte vor der Verwendung an einem sauberen, trockenen Ort bei Raumtemperatur gelagert werden. Nicht über längere Zeit erhöhten Temperaturen aussetzen.



702 Prominence Drive  
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A.

Tel. +1-724.337.5500

FDA-REGISTRIERT  
ISO 13485-ZERTIFIZIERT

xodusmedical.com | info@xodusmedical.com

LITIFUWF005 R0 3/13/2024