

Il Poggiatesta ProneSafe è stato progettato come inserto di ricambio da utilizzare con il ProneView Protective Helmet System

ISTRUZIONI PER L'USO

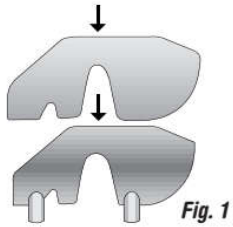


Fig. 1

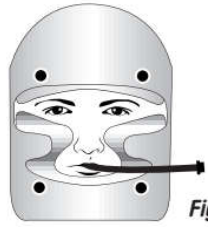


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

- 1) Aprire la confezione del ProneSafe 5 minuti prima dell'uso per assicurare una corretta espansione.
- 2) Inserire il poggiatesta ProneSafe all'interno del ProneView Helmet e allineare le rispettive aperture (Figura 1).
- 3) Mentre il paziente è in posizione supina, posizionare ProneView Helmet con il poggiatesta ProneSafe sul viso del paziente, assicurandosi che le sopracciglia siano visibili. Tenere il ProneView Helmet saldamente sul viso durante la rotazione in posizione prona (Fig. 2).
- 4) Dopo aver effettuato la rotazione in posizione prona sulla piattaforma a specchio ProneView, ricontrollare il corretto posizionamento tra il viso e il poggiatesta ProneSafe. Assicurarsi che il viso e gli occhi siano all'interno dall'apertura del ProneSafe e ci sia uno spazio adeguato tra il naso e lo specchio. Il tubo endotracheale o gli altri dispositivi non devono essere piegati o ostacolare la visibilità degli occhi (Fig. 3).
- 5) Inserire le gambe del ProneView Helmet negli inserti dello specchio. Regolare il corpo del paziente in modo adeguato per mantenere la posizione del collo neutra. Ricontrollare frequentemente gli occhi, il naso e il collo per garantire che siano in una posizione di sicurezza e che nulla sia in contatto con gli occhi o le palpebre (Fig. 4).

PRECAUZIONI:

- 1) Il poggiatesta ProneSafe deve essere utilizzato con il sistema ProneView e non dovrebbe mai essere utilizzato da solo.
- 2) Il poggiatesta ProneSafe è MONOUSO, non riutilizzare.
- 3) Pulire il casco rigido e lo specchio come indicato dal protocollo ospedaliero.

AVVERTENZE:

- 1) Monitorare frequentemente il collo, la testa, gli occhi, il naso e la bocca del paziente per assicurarsi che venga mantenuta una posizione di sicurezza e che il tubo ET non sia stato piegato o spostato. In caso contrario sono possibili conseguenze negative gravi, tra cui la cecità e la mancata ventilazione.
- 2) Il mancato mantenimento della posizione neutra del collo può causare danni al collo e/o abrasioni mento.
- 3) Non utilizzare il poggiatesta ProneSafe che non si sia espanso fino alla parte superiore del casco.



MADE IN THE
USA **latex**
free

FDA REGISTERED
ISO 13485 CERTIFIED

EC REP

EMERGO EUROPE
Molenstraat 15
2513 BH, The Hague
The Netherlands

 **xodus**
medical, inc.
Making Surgery Safer™

702 Prominence Drive Tel: 724.337.5500
Pittsburgh, PA 15068 U.S.A. Fax: 724.337.0555



xodusmedical.com • info@xodusmedical.com